



KOGEL STERILISATOR PRO

100W

Productkenmerken:

Automatische temperatuur: 200°C
Roestvrijstalen reservoir

Werking: Steriliseert metalen instrumenten met behulp van hoge temperatuur.

Gebruiksaanwijzing:

Plaats het apparaat op een stabiele werktafel.

Open het deksel en vul het reservoir met kwartsballen. Vul het reservoir tot maximaal 80% van de inhoud.

Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening en zet het aan. Het verwarmingslampje brandt rood terwijl de kwartsballen worden opgewarmd.

Na ongeveer 2 à 3 minuten is de gewenste temperatuur bereikt. Wanneer het lampje groen brandt en het rode verwarmingslampje uitgaat, plaatst u de te steriliseren metalen instrumenten (zoals scharen, scheermessen, enz.) recht op in de kwartsballen.

Laat de instrumenten 20 tot 30 seconden steriliseren. Draag vervolgens hittebestendige handschoenen en neem de gesteriliseerde instrumenten uit het apparaat.

Zodra de temperatuur van het reservoir 200°C bereikt, stopt het apparaat automatisch met verwarmen en gaat het verwarmingslampje uit. Wanneer de temperatuur daalt, schakelt het apparaat automatisch weer in en brandt het verwarmingslampje opnieuw rood.

Onderhoud:

Reinig het apparaat regelmatig met een alcoholdoekje. Gebruik nooit industriële oplosmiddelen of schuurmiddelen om het apparaat te reinigen.

Bewaar het apparaat altijd op een droge plaats.

Laat eventuele storingen uitsluitend controleren en repareren door een gekwalificeerde technicus.

Waarschuwingen:

Controleer vóór aansluiting of de netspanning overeenkomt met de spanning van het apparaat.

Zorg ervoor dat de stroomvoorziening correct is aangesloten.

Plaats het apparaat altijd op een stabiele werktafel.

Houd kinderen uit de buurt van het apparaat tijdens gebruik.

Gebruik het apparaat nooit zonder kwartsballen in het reservoir.

Raak de behuizing tijdens gebruik niet met blote handen aan om brandwonden te voorkomen.

Vul het reservoir met kwartsballen tot maximaal 80% van de inhoud om overlopen te voorkomen bij het plaatsen van instrumenten.

Schakel na het steriliseren het apparaat uit en draag handschoenen voordat u de instrumenten verwijdert.

Schakel het apparaat na gebruik altijd uit. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

Reinig het apparaat pas nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald en het volledig is afgekoeld.

Reinig het apparaat nooit rechtstreeks met water of andere vloeistoffen.

Technische specificaties:

100–110 V • 60 Hz • 100 W

220–240 V • 50 Hz • 100 W

Gebruik uitsluitend de
Parels voor kogelsterilisator Pro
Ref: 6193730

